

Kompass | Prophylaxe

Empfehlung für den Einsatz von Prophylaxeinstrumenten in der zahnärztlichen Praxis




SonicLine

Schallspitzen

1 Anwendung | **Scaling** (bis 2 mm)



2 Anwendung | **Scaling** (bis 4 mm)

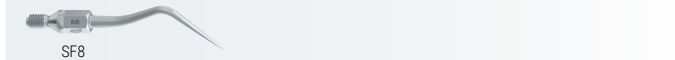

PiezoLine

Ultraschallspitzen **EM1** –
kompatibel mit EMS Einheiten



Ultraschallspitzen **SI1** –
kompatibel mit Sirona® Einheiten



Ultraschallspitzen **KA1** –
kompatibel mit KaVo PIEZOLux™ Einheiten




Ultraschallspitzen **ST1** –
kompatibel mit Satelec® und NSK Einheiten




Polierer und Bürsten

3 Anwendung | **Polieren**

Polierer (latexfrei)

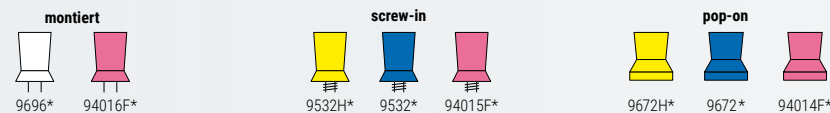

Bürsten und Träger

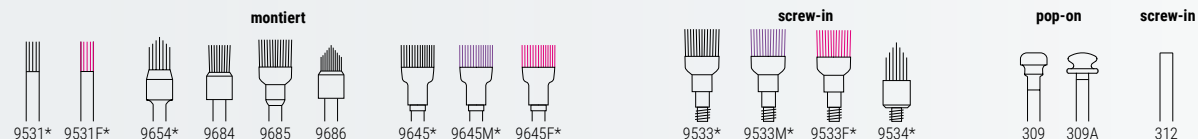

Polierer und Bürsten

Sachgemäße Anwendung

- Polieren Sie immer nur mit leichter Anpresskraft, um die Hitzeentwicklung zu minimieren.
- Polieren Sie immer in leicht kreisförmigen Bewegungen.

Drehzahlen

☞_{opt.} 1.500 min⁻¹

Höhere Drehzahlen führen zu schlechteren Oberflächen-
ergebnissen. Die **maximal zulässige Drehzahl** entnehmen
Sie bitte den Angaben auf der Verpackung und aus dem
Katalog. **Das Nichteinhalten der maximal zulässigen
Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko!**

Schall- und Ultraschallspitzen

Sachgemäße Anwendung

- Leistungsstufen beachten, die richtige Leistungsstufe entnehmen Sie bitte der beiliegenden Gebrauchsanweisung.
- Vor dem Ansetzen an den Zahn die Spitze mit ausreichend Spraykühlung in Betrieb nehmen. Hierfür muss bei allen Scalern eine hohe Durchflussmenge eingestellt werden.
- Die Spitzen sollten mit geringer Anpresskraft eingesetzt werden, da eine zu hohe Anpresskraft die Schwingungen der Spitze und somit die Effektivität verringert.

